



Clinical Diagnostics
Nederland



Overzicht Afnamematerialen

www.clinicaldiagnostics.nl



Urine set

Klinische Chemie

Urinepotje

1 Diagnostiek witte dop

2 Diagnostiek geel/rode dop

3 Diagnostiek geel/gele dop

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

Voor het verzamelen van urine.

Albumine in urine + ACR; Chemie.

Dysmorfe ery's en celcilinders.

Urine strip.

Vul de buis altijd binnen 1 uur na productie van de urine.

Het urinepotje kan worden weggegooid. Bepaling voor dysmorfe ery's moet binnen 2 uur na productie geanalyseerd zijn. Afname vindt bij voorkeur plaats op een laboratoriumlocatie.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (m.u.v. bepaling dysmorfe ery's).



Feces Calprotectine en iFOBT

Klinische Chemie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

iFOBT (Occult bloed) en Calprotectine.

Buisje niet meer openen nadat het staafje met de feces in de vloeistof is gedaan.

Kamertemperatuur.

Op de dag van productie/verzamen inleveren bij laboratorium/afnamepunt of brievenbus.



Urine set

Medische Microbiologie

Urinepotje

Diagnostiek geel/zwarte dop

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

Voor het verzamelen van urine.

Kweek op bacteriën en gisten.

Midstream urine opvangen volgens afname instructie.

2-8°C.

Voor MMB Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Feces microbiologie

Medische Microbiologie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

Bacteriën (Kweek/PCR), virussen (PCR) en parasieten (microscopie/PCR).

Potje voor driekwart vullen en draai de dop goed dicht.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post*. Aanvraag onderzoek Helicobacter pylori moet op de dag van afname worden ingeleverd bij een laboratorium/afnamepunt, mag niet per post.



SOA Urine

Moleculaire diagnostiek

Medische Microbiologie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

PCR op Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium en Trichomonas vaginalis.

Deze set is alleen geschikt voor diagnostiek bij mannen.

Vul het buisje met eerste straal urine tot tussen de aangegeven vullijnen (circa 4 ml).

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



SOA Swab

Moleculaire diagnostiek

Medische Microbiologie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

PCR op *Neisseria gonorrhoeae*, *Chlamydia trachomatis*, *Mycoplasma genitalium* en *Trichomonas vaginalis*.

Geschikt voor afname in vagina, keel of anus.

Keeluitstrijk: niet zinvol om *Trichomonas vaginalis* en *Mycoplasma genitalium* op te bepalen.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Uitstrijk

Medische Microbiologie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

Kweek op bacteriën (incl. BRMO), gisten/schimmels en PCR op virussen en bacteriën.

Swab afbreken op afbreekpunt.

2-8°C. **Let op:** kweek voor *Neisseria gonorrhoeae* niet in koelkast bewaren en zo snel mogelijk naar het lab brengen.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Nasopharynx-swab

Medische Microbiologie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

Geschikt voor gebruik bij kinderen. PCR op respiratoire virussen en *Bordetella pertusis* (Kinkhoest).

Swab afbreken op afbreekpunt.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



MRSA set

Medische Microbiologie

Diagnostiek

Let op

Temp. tot transport

Verzendinstructie

MRSA (Keel, Neus & Perineum).

Bij screening na bezoek buitenlands ziekenhuis, ook extra rectumuitstrijk insturen voor BRMO.

Bij screening op MRSA: indien er wonden of catheter aanwezig zijn, tevens wonduitstrijk en/of urinekweek insturen.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Steriele container

Universeel

Afnamemateriaal

Diagnostiek

Temp. tot transport

Verzendinstructie

Bijvoorbeeld nagel, sputum, punctaten.

Kweek op bacteriën, gisten/schimmels en/of PCR op virussen en bacteriën.

2-8°C.

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post.*



Breder potje vanuit koerierskit kan ook gebruikt worden.

● Cervixcytologie indicatief

Pathologie

Diagnostiek

Indicatieve Cervixcytologie en Humaan Papillomavirus. Voor deze afname kan ook het bredere potje uit de koerierskit gebruikt worden.

Let op

Deze afnameset NIET gebruiken voor het Bevolkingsonderzoek Baarmoederhalskanker. 2-30°C.

Temp. transport

Verzendinstructie

Verzenden op dag van afname via de logistieke dienst of via inleverlocatie (voorkeur) of versturen per post* bij gebruik van het smalle potje (afbeelding).



● Histologie

Pathologie

Diagnostiek

Weefsel ten behoeve van pathologie.

Let op

Een biopsie per potje. De potjes van één patiënt samen in één verzendenvolp. Enkel geschikt voor klein materiaal. Grotere potten zijn op aanvraag beschikbaar.

Temp. transport

Kamertemperatuur.

Verzendinstructie

Op de dag van afname inleveren bij afnamepunt (voorkeur) of versturen per post* bij gebruik van het smalle potje (afbeelding).



● Histologie huidstans (diverse maten)

Pathologie

Diagnostiek

Disposable huidstans voor het eenvoudig afnemen van huidmonsters en klein weefsel. Steriel per stuk verpakt.

Vragen?

Clinical Diagnostics Nederland

Kesslerpark 1
2288 GS Rijswijk
088 - 235 02 00
Locaties laboratoria en afnamepunten:
www.clinicaldiagnostics.nl

Medische Microbiologie

Voor intercollegiaal consult en vragen: **088 - 4500 821**
Buiten kantooruren: **071 - 5178 178**
(U kunt vragen naar de dienstdoende arts-microbioloog)

Klinische Chemie

Voor intercollegiaal consult en vragen: **071 - 516 00 22**
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.30 uur
Een CITO aanvragen kan op werkdagen van 08.00 - 15.00 uur

Pathologie

Voor intercollegiaal consult en vragen: **088 - 235 02 35**
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.30 uur

Locaties laboratoria & afname- en inleverlocaties

www.clinicaldiagnostics.nl/locaties

Ondanks dat wij met zorg dit overzicht hebben opgesteld, kunnen er zich altijd wijzigingen voordoen. Maak daarom bij voorkeur gebruik van de versie op de website of controleer of uw versie de meest actuele is. Indien gewenst kunt u altijd een nieuwe kaart bestellen wanneer uw versie verouderd is. Clinical Diagnostics Nederland accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden in de informatie, noch voor schade, overlast of ongemak dan wel anderszorgige gevolgen die voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik van de informatie of van een verouderde versie. Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag door naar ons vademecum op www.clinicaldiagnostics.nl/vademecum

*Door oncontroleerbare omstandigheden kan verzending per post ten koste gaan van de kwaliteit. In het weekend en op feestdagen kunt u medische post in de speciale brievenbus doen voor medisch materiaal. Deze wordt ook op zondag geleverd. In deze locatiewijzer ziet u waar u deze brievenbussen vindt: <https://www.postnl.nl/locatiewijzer/>. Filter op 'Brief posten' en kies voor 'Medisch'. Laat u patiënten diagnostisch materiaal versturen? Vertel dan welke brievenbus ze kunnen gebruiken.