



Vorbereiding

Allereerst controleert u of de houdbaarheidsdatum van het medium nog niet verlopen is.

Daarna gebruikt u het bijbehorende laboratoriumformulier en noteert u hierop de naam van de patiënt, het adres, de woonplaats, het burgerservicenummer en het verzekeringsnummer. Als laatste schrijft u de naam en de geboortedatum op de bijgevoegde stickers en plakt u deze op het potje met ThinPrep®.

Let op: deze set en instructie geldt alleen voor indicatieve cervixcytologische onderzoeken en **niet** voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Afname

1. Vul het aanvraagformulier volledig in.
2. Breng de borstel in de cervix en zorg voor een goed contact met de cervicale wand.
3. Draai de borstel vijfmaal rechtsom rond.
4. Beweeg de borstel een paar keer goed heen en weer in het potje.
5. Druk het witte borsteltje, middels de remover tube, boven het potje van de blauwe stok af. Hierdoor valt het borsteltje in het potje met ThinPrep®.
6. Sluit het potje goed af.

Let op: indien u het borsteltje 10 maal stevig uitstampt op de bodem van het potje, hoeft u de borstel niet mee te zenden.

Verpak- en verzendinstructie

1. Plaats het potje met patiëntmateriaal en het absorptiedoekje in de sealbag®. Verwijder de beschermstrip en plak de sealbag® dicht.
2. Schuif dit geheel in de verzendenvolop met kartonnen huls.
3. Voeg het laboratoriumformulier bij.
4. Sluit de verzendenvolop door deze dicht te plakken met de plakrand.
5. De envelop kan per PostNL worden verzonden als brievenbuspost.
6. Indien de Clinical Diagnostics koerier u bezoekt, kunnen de materialen ook worden meegegeven aan de koerier.

Het afname- en verzendmateriaal kunt u kosteloos bestellen via www.clinicaldiagnostics.nl of +31 (0)88 235 02 35.

NB: Bovenstaande verpak- en verzendmethode voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan het verzenden van biologische materialen conform UN3373/ADR-richtlijn. De verpakking is toegestaan door PostNL.