





Stap 1 Start

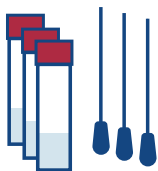

- Voor dit onderzoek zijn minimaal 3 afnames nodig.
- Open de verpakkingen van de Eswab.
- Haal de wattenstokjes en de buisjes er uit.

Stap 2a Afname - Neuskweek

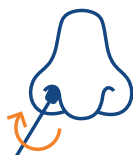

- Neem een neuskweek af door het wattenstokje in te brengen in de neus en langs de binnenzijde van beide neusvleugels te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b en 3.

Stap 2a Afname - Keelkweek




- Neem de tweede swab.
- Ga met het uiteinde van het wattenstokje langs de twee bogen (direct naast de huid).
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b en 3.

Stap 2a Afname - Perineum



- Neem de derde swab
- Neem een perineum kweek af door met het wattenstokje rondom de anus te strijken.
- Ga voor deze afname verder naar stap 2b en 3.

Stap 2b Afname

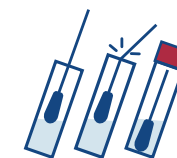

- Stop het wattenstokje in het buisje. Breng het streepje op het stokje (breuklijn) op gelijke hoogte met de bovenrand.
- Zet het stokje tegen de rand van het buisje. Buig het uitstekende gedeelte en breek het stokje af.
- Gooi het uiteinde weg. Draai de dop weer goed vast.

Stap 3 Identificatie afnamemateriaal



- Vul de patiëntgegevens, afnamedatum en *herkomst van het lichaamsmateriaal in op de het bijvoegde etiket.
- Plak het etiket in de lengterichting op de buis.

Stap 4a Aanvraagformulier



- Vul het aanvraagformulier zo volledig mogelijk in.

Stap 4b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 4c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendenvelop.

Belangrijk Let op

Bij wonden/ huidafwijkingen en urinecatheter ook een MRSA kweek afnemen van deze afnamelocaties.