




Stap 1 Start



- Haal de 4 buisjes uit het doosje.

Stap 2a Afname

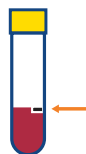

- Vul de 4 buisjes ieder met 1 ml veneus bloed.
- **Belangrijk:** Zorg dat de buisjes gevuld worden tot op de zwarte markering van het buisje.
- **Let op:** Hou het buisje 2-3 seconden op de naald, ook als deze voldoende gevuld lijkt te zijn.

Stap 2b Mengen



- Meng de buisjes 10 maal door ze zonder veel kracht te kantelen. Laat het bloed hierbij voldoende contact maken met de binnenkant van het buisje.
- Vermijd bij het mengen dat de gel desintegreert.

Stap 3 Identificatie afnamemateriaal



- Vul op de buisjes de datum en tijdstip van afname in en controleer deze goed.

Stap 4a Verzamelen



- Plaats de buisjes terug in het doosje.

Stap 4b Verzendklaar maken



- Stop de afnamebuis met het absorptiemateriaal in de safetybag (plastic zakje).
- Verwijder de plakstrip van de safetybag en plak dicht.

Stap 4c Verzenden



- Doe de safetybag en het aanvraagformulier tussen het kartonnetje in de verzendvelop.

Belangrijk Let op

- Afname van de IGRA test kan **alleen** plaatsvinden als de buisjes binnen 16 uur op het MML aanwezig kunnen zijn. De buisjes moeten na afname zo snel mogelijk op transport worden gezet.
- Afname kan alleen plaatsvinden op de dag dat de koerier de afnamematerialen komt ophalen.
- Afname kan plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen kantooruren.
- Bewaar de buisjes na het mengen op kamertemperatuur (**niet in de koelkast**).